

Product data sheet




Information

Designation	Arsis Full Black removable shower seat, matt black
Reference	047750

Product advantages

- + An innovative and unique product: seat can be unclipped from its wall bracket and interchanged with the Arsis shower tray.
- + Large, ergonomic seat with sleek design for maximum comfort.
- + The ideal concept for transforming your shower and making it safely accessible.
- + An upgradeable product!

Description

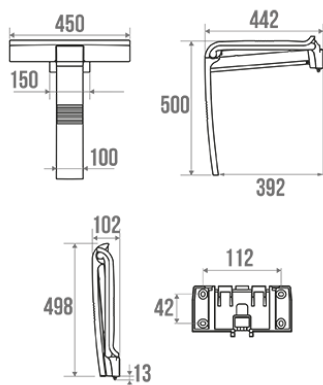

Aluminum base.
Ergonomic matte-black polymer seat, large size 450 mm, mounted on Ø 25 mm epoxy aluminum frame.
Locking position, anti-theft.
Can be unclipped from its wall bracket for maintenance and occasional use in public areas.
Shelf can be mounted on bracket in place of seat (Ref. 047733).
Coordinates perfectly with Arsis Full Black handrails.

Standard height 500 mm.
Screws included.
Invisible fastenings.
The design of this product is coordinated with Arsis shower rails.
Perfectly suited to the hotel industry.

Technical characteristics

Finish	Epoxy-coated
Color	Mat black
Dimensions	442 x 450 x 500 mm
Diameter Ø	25 mm
Material	Polymer & Aluminium
Gross weight	3.300 kg
Packaging	Cardboard box + Label
CE Marking : safe load	150 kg

Laboratory tests	225 kg
Made in France	yes
Maintenance	yes
Guarantee	10 years
Net weight	3.300 kg
Gencod	3563390477502
Custom code	7615200000
Technical sheet	A13570016_IND_13
Spare parts	Réf. : 049742 : Clavette rouge.

Fixing and maintenance advices

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024