

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre d'angle 2 murs Arsis, Aluminium Epoxy Blanc et chromé mat
Référence	049930
Prix public HT	181,31 €
Dont éco-part HT	0,01 €

Les + produit

- + Facilite le déplacement à l'entrée et à la sortie de la douche.
- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Se positionne à droite ou à gauche.
- + Fixations invisibles.

Description

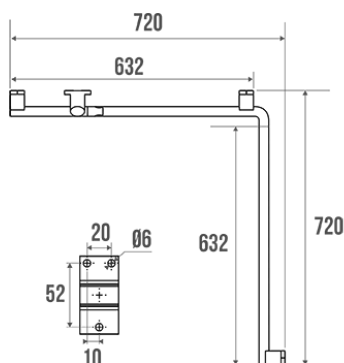

Tube elliptique 38x25 mm en aluminium époxy blanc. Angle 90°. Symétrique.
Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat.
3 points de fixations invisibles. Le 3ème point est à positionner pour version droite ou gauche.
Garantie anticorrosion.

Visserie fournie.
Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Chromé mat
Dimensions	632 x 632 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	1.730 kg
Conditionnement	Carton neutre
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg

Garantie	10 ans
Gencod	3563390499306
Code douanier	7615200000
Notice	A04983001_IND_03
Pièces détachées	Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049009 : Cache-fixation gris chromé mat

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024