

## Fiche technique




### Informations

|             |   |
|-------------|---|
| Désignation | Barre droite Arsis 1200 mm, Aluminium Anodisé |
| Référence   | 049619  |

### Les + produit

- + Avec support douchette coulissant et tablette de douche intégrée.
- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Esthétique et design.
- + Garantie totale anticorrosion.

## Description

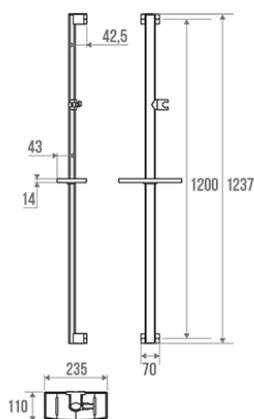

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anodisé brillant. Cache-fixations en résine de synthèse chromés.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné aux accessoires de la gamme Arsis. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

## Caractéristiques techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Finition               | Anodisé   |
| Dimensions             | 1200 mm   |
| Diamètre Ø             | 38 x 25 mm  |
| Matière                | Aluminium   |
| Poids brut             | 0.990 kg  |
| Conditionnement        | Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche |
| CE - Charge admissible | 75 kg   |
| Tests laboratoire à    | 110 kg  |
| Garantie               | 10 ans  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Gencod           | 3563390496190   |
| Code douanier    | 7615200000  |
| Notice           | <a href="#">A04984002_IND_11</a>  |
| Pièces détachées | Réf. 049006 : Cache-fixation chromé, Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé |

## Conseils de pose et entretien

---

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

## Entretien

**IMPORTANT** : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024