Siège de douche hauteur fixe avec dossier et accoudoirs ERGONOMIC

Réf. 047820

Fiche technique





Informations

Désignation Siège de douche hauteur fixe avec dossier et accoudoirs


ERGONOMIC

Référence 047820

Les + produit

- + Confort maximal: avec dossier et accoudoirs relevables.
- + Idéal pour les petits espaces : peu encombrant une fois replié.
- + Hygiène optimale : coussins amovibles.

Description

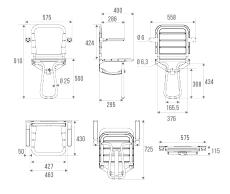

Escamotable avec béquille.

Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm. Assise ergonomique large, 4 lattes incurvées en polypropylène blanc. Coussins souples en polyuréthane gris type RAL 7012.

Permet de prendre une douche en position assise.

Hauteur normalisée 500 mm.

Caractéristiques techniques

Finition Epoxy

Dimensions 427 x 450 x 430 mm

Diamètre Ø25 mmMatièreAluminiumPoids brut6.650 kg

Conditionnement Carton + étiquette

CE - Charge admissible 150 kg

 Tests laboratoire à
 225 kg

 Garantie
 10 ans

 Poids net
 5.750 kg

 Gencod
 3563390478202

 Code douanier
 7615200000



Siège de douche hauteur fixe avec dossier et accoudoirs ERGONOMIC

Réf. 047820

Notice <u>\$00002132_IND_03</u>

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024