

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre relevable 600 mm avec béquille
Référence	048866
Prix public HT	329,66 €
Dont éco-part HT	0,01 €


Les + produit

- + Sécurisant : blocage en position verticale.
- + Facilite les transferts et le relevage.
- + Béquille réglable en hauteur.

Description

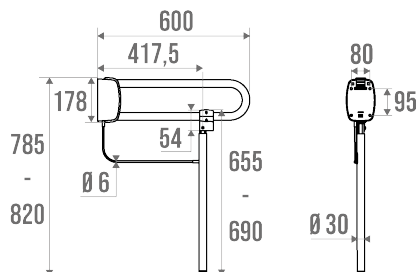

Tube inox 304 brossé Ø 30 mm. Platines en résine de synthèse.
Avec béquille de soutien intégrée, réglable par vérin.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

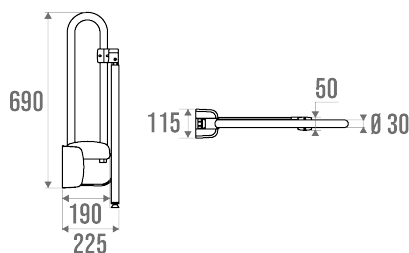

Caractéristiques techniques

Finition	Brossé
Dimensions	600 mm
Diamètre Ø	30 mm
Matière	Inox
Poids brut	3.140 kg
Conditionnement	Carton + étiquette
Charge admissible	150 kg

Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390488669
Code douanier	7324900010
Notice	S00002226_IND_01

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée pour la barre supérieure : 80 cm du sol dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Sur cloisons peu résistantes, il est préférable de rajouter un poteau de fixation ref. 048400 ou d'installer une contreplaque derrière la cloison.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024