

Fiche technique



Informations

Désignation	Barre coudée 135°, Nylon & Acier, Blanc
Référence	045220
Prix public HT	139,12 €
Dont éco-part HT	0,02 €

Les + produit

- + Toucher doux et chaud.
- + Préhension optimale : tube elliptique.
- + 2 versions : avec ou sans embases

Description

Multicomposants : Nylon + profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm pour une meilleure préhension.


Toucher doux et chaud.

Symétrique.

Trois points de fixation.

Visserie inox fournie.

Idéal en milieu hospitalier, Ehpad et maisons de retraite pour assurer du confort aux patients.

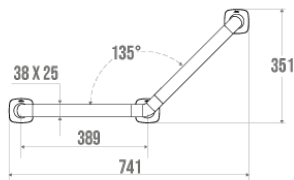

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	741 x 351 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Nylon & Acier
Poids brut	1.090 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390452202
Code douanier	7324900090

Notice

[A04500000_IND_01](#)

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024