

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre de douche en L gauche - 576 x 1276 mm, sans embases, Nylon & Acier, Blanc
Référence	045295
Prix public HT	257,59 €
Dont éco-part HT	0,04 €

Les + produit

- + Toucher doux et chaud.
- + Préhension optimale : tube elliptique.
- + 2 versions : avec ou sans embases

Description

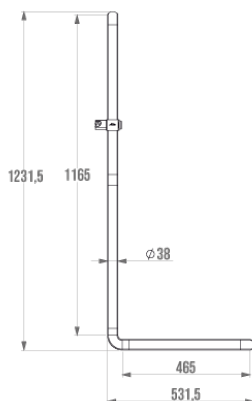

Version gauche.

Multicomposants : Nylon + profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm pour une meilleure préhension.

Avec support douchette coulissant.

Toucher doux et chaud.

Livré démontée.

Sans embases.

Visserie inox fournie.

Idéal en milieu hospitalier, Ehpad et maisons de retraite pour assurer du confort aux patients.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	576 x 1276 mm
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Nylon & Acier
Poids brut	1.250 kg
Conditionnement	Carton neutre
Charge admissible	120 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans

Poids net	1.905 kg
Gencod	3563390452950
Code douanier	7324900090
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024