

# Fiche technique





#### **Informations**

Désignation Barre de douche en L gauche - 826 x 1276 mm, Nylon & Acier,

Blanc

Référence 045291 Prix public HT 245,84 €

Dont éco-part HT  $0,04 \in$ 

#### Les + produit

- + Toucher doux et chaud.
- + Préhension optimale : tube elliptique.
- + 2 versions : avec ou sans embases

### Description



Version gauche.

Multicomposants : Nylon + profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm pour une meilleure préhension.

Avec support douchette coulissant.

Toucher doux et chaud.

Livré démontée.

Visserie inox fournie.

Idéal en milieu hospitalier, Ehpad et maisons de retraite pour assurer du confort aux patients.

# Caractéristiques techniques

Couleur Blanc

Dimensions 826 x 1276 mm
Diamètre Ø 38 x 25 mm
Matière Nylon & Acier
Poids brut 1.250 kg
Conditionnement Carton neutre
CE - Charge admissible 150 kg

 Tests laboratoire à
 225 kg

 Garantie
 10 ans

 Poids net
 1.905 kg



# Barre de douche en L gauche - 826 x 1276 mm Réf. 045291

Gencod
Code douanier
Notice

3563390452912 7324900090

Aucune notice disponible

# Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée: 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

#### Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024