

## Fiche technique




### Informations

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Désignation | Barre d'appui en T - 800 x 1200 mm, sans embases, Nylon & Acier, Blanc |
| Référence   | 045346                                                                 |

### Les + produit

- + Toucher doux et chaud.
- + Préhension optimale : tube elliptique.
- + 2 versions : avec ou sans embases

## Description

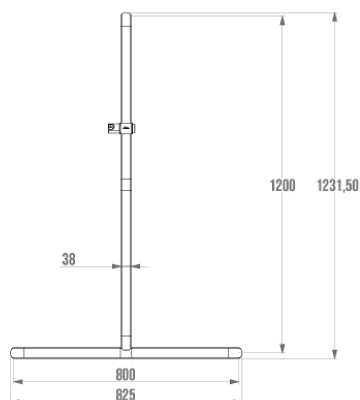

Multicomposants : Nylon + profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm pour une meilleure préhension.

Avec support douche coulissant.

Toucher doux et chaud.

Sans embases.

Livrée démontée.

Visserie inox fournie.

Idéal en milieu hospitalier, Ehpad et maisons de retraite pour assurer du confort aux patients.

## Caractéristiques techniques

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur             | Blanc         |
| Dimensions          | 876 x 1276 mm |
| Diamètre Ø          | 38 x 25 mm    |
| Matière             | Nylon & Acier |
| Poids brut          | 2.800 kg      |
| Conditionnement     | Carton neutre |
| Charge admissible   | 120 kg        |
| Tests laboratoire à | 225 kg        |
| Garantie            | 10 ans        |
| Poids net           | 2.150 kg      |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gencod        | 3563390453469            |
| Code douanier | 7324900090               |
| Notice        | Aucune notice disponible |

## Conseils de pose et entretien

---

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024