

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre coudée 135° Ergosoft, Polyalu, Blanc
Référence	046225

Les + produit

- + Barrette de préhension antidérapante : anti-rotation et anti-glissement de la main.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

Description

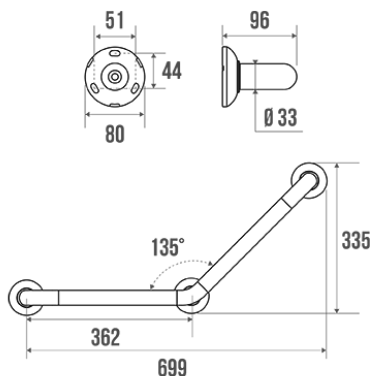

Barre ergonomique. Symétrique.
Multicomposants : résine de synthèse blanc + profil aluminium + barrette de préhension taupe.
Tube Ø 33 mm.
Liseré de platine et corps central blanc.
3 points de fixation.

Visserie inox fournie.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	362 x 362 mm
Diamètre Ø	33 mm
Matière	Polyalu
Poids brut	1.120 kg
Conditionnement	Sachet plastique neutre
Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390462256

Code douanier

7615200000

Notice

[A55035800_IND_06](#)

Pièces détachées

Réf. 046100 : Cache-fixation Polyalu. Réf. 046101 : Sachet 3 vis fixations inox. Réf. 046288 : Embase, cache-fixation et vis.

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024