

# Fiche technique





#### **Informations**

Désignation Siège de douche, Taupe & Gris chrome, Hauteur 550 mm


Référence 047627 Prix public HT 230,79 €

Dont éco-part HT 0,24 €

#### Les + produit

- + Sécurité maximale grâce à la béquille automatique.
- + Peu encombrant en position relevée.
- + Facilité d'installation.
- + Garantie anticorrosion.

### Description

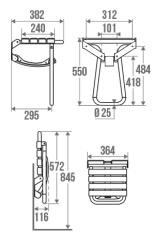

Assise standard. 4 lattes polypropylène taupe. Tube aluminium époxy gris. Permet de prendre une douche en position assise.

Hauteur spécifique 550 mm, réservée à l'usage particulier. Norme pour la collectivité : 500 mm.

## Caractéristiques techniques

Finition

Couleur

Dimensions

Diamètre Ø

Matière Poids brut

Conditionnement

Charge admissible

Ероху

Taupe & Gris chrome

382 x 364 x 550 mm

25 mm

Polypropylène & Aluminium

3.000 kg Boîte carton

150 kg





Tests laboratoire à

Garantie

Gencod

Code douanier

Notice

Pièces détachées

225 kg

10 ans

3563390476277

7615200000

S00001353\_IND\_02

Réf. 047628 : Latte assise taupe. Réf. 047644 : Tampon pour pied siege de douche. Réf.

047623 : Latte de rappel.

### Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

#### Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024