

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis 2-wand hoekdoucheglijstang, Wit geëpoxeerd aluminium en mat chroom
Referentie	049925

De pluspunten

- + Ellipsbuis voor een betere grip.
- + Moduleer baar : wijzigbaar in T of in L bij de beginmontage.
- + Met schuifelement voor douchekophouder.
- + Plaatsing vergemakkelijkt bij de inlaat en de uitlaat van de douche.

Beschrijving

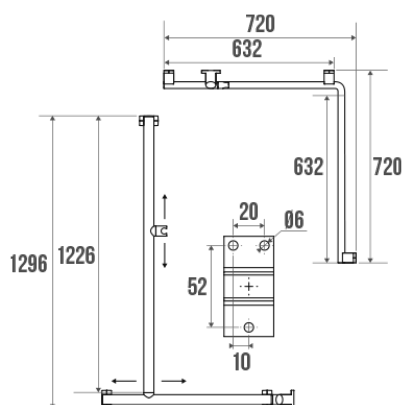

Wit epoxy aluminium elliptische buis 38 x 25 mm. Dof verchroomde bevestigingsrozetten in kunstshars.
Moduleer baar : wijzigbaar in T of in L bij de beginmontage.
3 vaststellingspunten.
Onzichtbare bevestigingen.
Geleverde schroeven.
Antiroestgarantie.
Ze passen perfect bij de stangen van het ARSIS® Comfort gamma.
Ideaal voor hotelgebruik.
Versie ook beschikbaar in wit kleur, ref. 049825.

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Mat verchroomd & wit
Afmetingen	1296 x 720 x 720 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	2.600 kg
Verpakking	Kartonnen doos
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg

Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390499252
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04982007_IND_10
Wissel stukken	Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049009 : Cache-fixation gris chromé mat

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024