

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Multifunctionele steungreep voor toiletten
Referentie	048540

De pluspunten

- + Omkeerbaar.
- + Geïntegreerde accessoires: boren is niet nodig.
- + Ideaal voor kleine ruimtes.
- + Eenvoudig te installeren: voorgeboorde spijlen.

Beschrijving

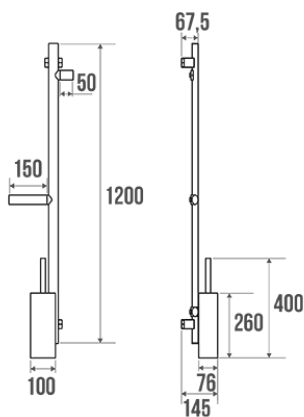

38x25 mm elliptische buis van aluminium, bevestigingsdoppen van polymeer. Onzichtbare bevestigingen.

Beschikbaar voor de toiletruimte met rolhouder, borstelhouder of jashaak voor het ophangen van kleine voorwerpen of kledingstukken: wandelstok, tas, hoed, sjaal.

Vorgeboorde buizen om de 50 mm voor het monteren van accessoires, afhankelijk van de vereiste hoogte en de positie rechts of links (omkeerbaar).

Technische kenmerken

Afmetingen	257 x 1226 x 67,5 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	1.790 kg
Verpakking	Kartonnen doos
CE : toegelaten belasting	100 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja

Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	1.330 kg
Gencod	3563390484500
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04841001_IND_04

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024